


エアゾール 各部位の名称

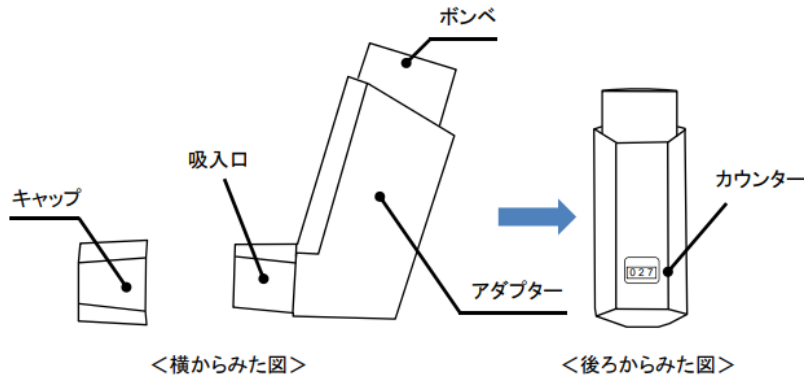

エアゾールの初回準備方法

※新しい吸入器を使用する前は空噴霧が必要です

空噴霧

- キャップを外します
- 吸入器を5回振ります
- 吸入器のボンベを押すと霧状のガスが出ます

初回のみ必要な操作です。
毎回行わないように指導します。

主薬と噴霧ガスを均一にするため、噴霧前に容器を十分に振る必要があります。患者の混乱を防ぐため、振る必要のない製剤も振ると指導します。

空噴霧の回数は
()回です

処方薬	商品名	カウンター	空噴霧回数	お手入れの方法
	アドエア	あり	4回	吸入口を良く拭く/週
	メプチンエアー	あり	2回	吸入口を良く拭く/週
	メプチンキッドエアー	あり	2回	吸入口を良く拭く/週
	フルティフォーム	目盛りあり	4回	吸入口を良く拭く/週
	ビレーズトリ	目盛りあり	4回	※流水で洗う/週
	オルベスコ	なし	3回	吸入口を良く拭く/週
	アトロベント	なし	2回	※流水で洗う/週
	インタール	なし	4回	※温水で毎回洗う
	キューバール	なし	2回	※流水で洗う/週
	サルタノール	なし	不要	※流水で洗う/週
	フルタイド	なし	数回	※流水で洗う/週
	ペロテック	なし	2回	※流水で洗う/要時

アダプターの洗浄方法

※流水で洗う方法

- (1) アダプターから、ボンベとキャップを外します。外したボンベは濡らさない。
- (2) アダプターの中を約30秒間、ぬるま湯で洗い流し、その後アダプターを逆さまにして、さらに約30秒間洗い流します。
- (3) アダプターを十分に乾燥させます。濡れているうちはボンベをセットしない。
- (4) アダプターが完全に乾いたら、お薬が出ないように、ボンベをアダプターに差し込みます。
- (5) 洗浄後は、(振る→空噴霧)の操作を2度おこなってから使用してください。

エアゾールの吸入手順(薬剤師用)

(薬品名:エアゾール全般)

※ 残量が少ない時は早めに新しいものを処方してもらって下さい

※ 初回準備方法(空噴霧)は1枚目(1/2)を参照

